

**Cada aplicador contiene los siguientes componentes:**

Ácido láctico, glucógeno, propilenglicol, metilhidroxipropilcelulosa, lactato de sodio, agua con pH 3,8.

No contiene conservantes. Sin hormonas.

**Advertencias**

No utilizar si el tapón de cierre está roto. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el tubo. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Precaución**

Evite el uso del gel vaginal **GineCanesbalance™** si está intentando quedarse embarazada, ya que el gel tiene un pH bajo, que puede hacer que el medio sea menos idóneo para los espermatozoides. No utilice el gel como método anticonceptivo.

Para más información y preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [www.ginecanesbalance.es](http://www.ginecanesbalance.es)

**Distribuido por**

Bayer Hispania, S.L.  
Av. Baix Llobregat, 3-5  
08970 Sant Joan Despí  
(Barcelona)

**Fabricante**

Rolf Kullgren AB,  
Ågatan 4, 646 30  
Gnesta Suecia



34102.02

**Bayer**



**GineCanesbalance™**

Vaginosis bacteriana  
Gel vaginal

**El gel vaginal GineCanesbalance™ está clínicamente probado para tratar de forma fácil y eficaz los síntomas de la vaginosis bacteriana mediante el restablecimiento del pH normal y la flora vaginal.**

**¿Qué es la vaginosis bacteriana (VB)?**

La VB es una enfermedad vaginal muy frecuente. Normalmente, en la vagina viven de forma natural diferentes tipos de bacterias; las que cuentan con una mayor presencia son las bacterias ácido-lácticas.

Las bacterias ácido-lácticas producen ácido láctico acidificante, mantienen el pH bajo normal de la vagina y la protegen frente a infecciones. Con este pH bajo, normalmente se inhibe el crecimiento de microorganismos bacterianos no deseables.

Cuando se reduce el número de bacterias ácido-lácticas y aumentan los niveles de pH, se produce un cambio en la situación normal y un crecimiento de bacterias "nocivas". Esta enfermedad se denomina médicamente vaginosis bacteriana. Los síntomas principales asociados a la VB son olor desagradable, flujo vaginal anormal y molestias en la vagina.

**¿Qué causa la vaginosis bacteriana?**

Los factores que alteran el medio vaginal pueden provocar VB. Incluyen menstruación prolongada, uso de productos de higiene íntima, duchas intravaginales frecuentes, métodos anticonceptivos, medicamentos vaginales, mantenimiento de relaciones sexuales y estrés. La administración de tandas de antibióticos y el uso de un

dispositivo intrauterino (conocido habitualmente como DIU) también pueden afectar al equilibrio vaginal.

### **El gel vaginal GineCanesbalance™ trata los síntomas de la VB de forma natural**

El gel GineCanesbalance contiene ácido láctico, que neutraliza de forma eficaz el olor desagradable y restablece el pH normal de la vagina. También contiene glucógeno, que proporciona nutrientes a las bacterias ácido-lácticas y ayuda a su crecimiento. Con niveles de pH normales y nutrientes, se produce un crecimiento de las bacterias ácido-lácticas protectoras y se restablece el equilibrio natural de la vagina; se reducen de forma eficaz el flujo vaginal anormal y el malestar. El tratamiento se suministra en aplicadores fáciles de usar con tubos precargados de un solo uso.

### **¿Cuándo usar el gel vaginal GineCanesbalance™?**

El gel GineCanesbalance combate el olor desagradable, el flujo vaginal anormal y las molestias y restablece los valores normales del pH.

### **¿Cómo usar el gel vaginal GineCanesbalance™?**

<b>Tratamiento</b>	Para la reducción de forma eficaz del olor desagradable, el flujo vaginal anormal, el malestar y la vaginosis bacteriana.
	Uso de 1 tubo diario durante 7 días

Desenrosque el tapón de cierre, siéntese o tumbese en una posición cómoda e introduzca suavemente el cuello del aplicador en la vagina sin provocarse molestias. Apriete suavemente el aplicador para que salga el contenido. Retire el tubo, sin dejar de apretarlo, y deséchelo. El mejor momento para aplicar el gel GineCanesbalance es antes de irse a la cama. Podría serle útil usar un protegeslip, ya que es frecuente que note una ligera pérdida. Esto no significa que el tratamiento no ha funcionado.

### **El gel GineCanesbalance™ está clínicamente probado**

Estudios clínicos han demostrado que la fórmula del gel GineCanesbalance es segura y eficaz. Se obtiene un beneficio triple, ya que reduce de forma eficaz el olor desagradable y el flujo vaginal anormal mediante el restablecimiento del pH, restringe el crecimiento de bacterias nocivas y ayuda a las bacterias beneficiosas (lactobacilos) a restablecer el medio natural.

### **El gel GineCanesbalance™ es seguro para su uso**

El gel GineCanesbalance se presenta en forma de higiénicos aplicadores monodosis. Puede usarse durante el embarazo y la menstruación. No obstante, debe consultar a su médico si durante el embarazo piensa que puede tener una infección vaginal. El gel GineCanesbalance puede provocar cierto escozor durante las infecciones vaginales fúngicas (p. ej., candidiasis) o cuando existen pequeñas grietas en el tejido vaginal. Este escozor es temporal y debe desaparecer. Si le preocupa, acuda al médico.

### **¿Cuándo debe acudir al médico?**

Póngase en contacto con su médico si los síntomas empeoran, experimenta dolor, las molestias no cesan, aparece sangre en el flujo vaginal o el flujo vaginal se produce durante la menopausia. Debe consultar a su médico si durante el embarazo piensa que puede tener una infección vaginal. Si no experimenta ningún alivio de los síntomas después de usar el gel GineCanesbalance en la forma indicada, contacte inmediatamente con su médico para que la examine. Consulte a su médico para un diagnóstico de VB.

### **¿Qué contiene el gel GineCanesbalance™?**

El envase contiene 7 higiénicos aplicadores con un tubo de 5 ml cada uno de un solo uso.