



Respisalíne®

HIGIENE NASAL
CONTIENE AGUA DE MAR
100% NATURAL
ISOTÓNICA

¿Qué es Respisalíne y cuándo debe usarlo?

Respisalíne Higiene Nasal es una solución isotónica diluida de agua de mar, 100% natural, rica en oligoelementos. Es una forma segura, sencilla y efectiva de limpiar las fosas nasales (o nariz). Respisalíne Higiene Nasal está adaptado incluso a la mucosa más frágil de la nariz y es seguro utilizarlo varias veces al día, durante largo tiempo. Sin conservantes ni aditivos.

Respisalíne Higiene Nasal:

- Limpia secreciones nasales, alérgenos, virus y bacterias, para proteger frente a resfriados y alergias.
- Hidrata la mucosa nasal para respirar con facilidad.
- Restablece la respiración nasal saludable.

Respisalíne Higiene Nasal también se recomienda para preparar la zona para otros tratamientos nasales.

Antes de usar Respisalíne:

No es necesario tomar precauciones si el producto se usa según las instrucciones.

Después de cualquier cirugía o accidente, consulte a su médico.

Respisalíne Higiene Nasal puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia.

Respisalíne Higiene Nasal está recomendado para adultos y niños a partir de 3 años.

¿Cómo usar Respisalíne Higiene Nasal?

Respisalíne puede utilizarse con independencia de la posición del recipiente.

- 1 Encaje el aplicador nasal.
- 2 De pie frente al lavabo, incline y gire la cabeza hacia un lado.
- 3 Introduzca con cuidado el aplicador en el orificio nasal superior y presione el frasco para que salga la solución.
- 4 Repita el proceso en el otro orificio nasal.
- 5 Suéñese la nariz. Repita el proceso, si es necesario.
- 6 Lave el aplicador con agua caliente después de cada uso y séquelo.



Aplicar Respisalíne con la frecuencia que sea necesaria para obtener el alivio deseado.

Otros formatos disponibles:

- Respisalíne Descongestivo Nasal, para adultos y niños a partir de 6 años que tienen la nariz tapada.
- Respisalíne Bebé, para niños y bebés a partir de las 2 semanas de edad.

Advertencias:

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en la parte inferior del frasco y del envase.

Atención: Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. No perforar ni quemar, aun después del uso.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.



Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint Malo, France

Distribuidor:
Bayer Hispania, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Fecha de revisión: Diciembre 2013

75 ml



140

	Fabricante
	Este símbolo es obligatorio para los productos sanitarios que entran en el Mercado Europeo. Indica conformidad con los requisitos de salud y seguridad marcados en las Directrices Europeas. El símbolo puede ir acompañado de 4 dígitos que identifican el número del Organismo Notificado. Las dimensiones del símbolo no deben exceder de 5 mm de alto.
	Reciclable
	Límite de temperatura
	Fecha de caducidad
	Número de lote
	Capacidad del envase en ml para el producto propulsado por aire comprimido
	Consultense las instrucciones de uso

CN0T914

Bayer